


CRP kontrola vysoká

CRP kontrola nízká

Kat.č. 67161
Kat.č. 67672

Návod k použití

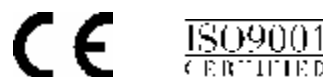

Určený účel použití

Orion Diagnostica CRP Kontroly jsou určeny ke kontrole kvality testu CRP měřeným na přístroji Turbox/Turbox plus nebo na biochemických analyzátoch.

Pro použití *in vitro*.

Princip metody

Kontroly použijte stejným způsobem jako pacientské vzorky za dodržení postupů určených pro danou metodu.

Reagencie

Kontroly jsou materiál lidského původu. Zacházejte s nimi stejným způsobem jako s pacientským vzorkem.

Příprava

CRP Kontroly jsou připraveny k použití. Materiál nechte temperovat 30 minut na laboratorní teplotu (18...25°C). Dobře promíchejte. Netřepete.

Skladování

CRP Kontroly jsou stabilní do data expirace, pokud jsou skladovány při 2...8°C. Otevřená lahvička je stabilní 2 měsíce při 2...8°C.

Lahvičku, která by vykazovala známky mikrobiálního růstu, vyhod'te.

Očekávané hodnoty

Získané hodnoty by se měly pohybovat uvnitř indikovaného rozmezí. Každá laboratoř by si měla vytvořit vlastní průměr a přesná data.

Upozornění a varování

Reagencie obsahují < 0,1% azidu sodného jako konzervační činidlo. Azid sodný uvolňuje toxický plyn, pokud je v kontaktu s kyselinami. Azid sodný může reagovat s kovovými uzávěry za tvorby explozivních azidů příslušných kovů. Tvorbě azidů lze předejít tím, že při likvidaci reagií opláchnete materiály velkým množstvím vody.

Doporučujeme, aby všechny použité materiály a reagencie byly před likvidací autoklávovány (1 hod při 121°C).

CRP kontroly obsahují materiál lidského původu, který byl testován a shledán negativním na HbsAg a protilátky proti HCV a HIV 1 a 2. Přesto s nimi zacházejte jako s materiálem schopným přenášet infekční agens.

Vysvětlení symbolů použitých na štítcích

Diagnostický zdravotnický prostředek *in vitro*



36064- 2

Katalogové číslo

REF

Číslo šarže

LOT

Teplotní rozmezí: skladujte při teplotě 2...8°C



Použitelné do



Kontrola vysoká

CONTROL H

Kontrola nízká

CONTROL L

Původ lidský

ORIG HUM

Obsahuje azid sodný

CONT NAN₃

Výrobce:

Orion Diagnostica Oy
P.O. Box 83, FIN-02101 Espoo, Finland
Tel. +358-10-42 995; fax. +358-10-429 2794
www.oriondiagnostica.fi

Sídlo v ČR:

Orion Diagnostica-organizační složka
Bělohorská 57, 169 00 Praha 6
Tel. 233 350 533
E-mail: orion@oriondiagnostica.cz
www.oriondiagnostica.cz

Originální příbalová informace: 36064- 2
Datum poslední revize textu: 24.2.2005