


Pufry

Návod k použití

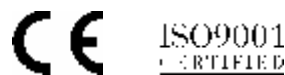

Pro diagnostické použití *in vitro*.

Kat.č.	Položka	Objem
68499	CRP pufr	200 ml
67365	Reakční pufr	200 ml

Reagencie obsahují azid sodný, čtěte „Upozornění a varování“.

Určený účel použití

CRP pufr a reakční pufr firmy Orion Diagnostica je určen, společně s reagensy a kalibrátory této firmy, ke kvantitativnímu měření specifických proteinů na automatických biochemických analyzátoch.

Pracovní postup

Pufry používejte podle návodu k použití pro test.

Příprava

CRP pufr (0,1 M fosfát) a Reakční pufr (0,05 M Tris) jsou připraveny k použití.

Skladování

Neotevřené kalibrátory jsou stabilní do data expirace, jsou-li skladovány při 2...8°C.

Upozornění a varování

Reagencie obsahují < 0,1% azidu sodného jako konzervační činidlo.

Azid sodný uvolňuje toxický plyn, pokud je v kontaktu s kyselinami.

Azid sodný může reagovat s kovovými uzávěry za tvorby explozivních azidů příslušných kovů. Tvorbě azidů lze předejít tím, že při likvidaci reagensů opláchnete materiály velkým množstvím vody.

Doporučujeme, aby všechny použité materiály a reagensy byly před likvidací autoklávovány (1 hod při 121°C).

Vysvětlení symbolů použitých na štítcích

Diagnostický zdravotnický prostředek *in vitro*



Katalogové číslo



Číslo šarže



36079-4

Teplotní rozmezí: skladujte při teplotě 2...8°C



Použitelné do



Obsah

CONT

Obsahuje azid sodný

CONT NAN₃

Pufr

BUF

Výrobce:

Orion Diagnostica Oy
P.O. Box 83, FIN-02101 Espoo, Finland
Tel. +358-10-42 995; fax. +358-10-429 2794
www.oriondiagnostica.fi

Sídlo v ČR:

Orion Diagnostica-organizační složka
Bělohorská 57, 169 00 Praha 6
Tel. 233 350 533, fax 233 350 532
E-mail: orion@oriondiagnostica.cz
www.oriondiagnostica.cz

Originální příbalová informace: 36079-4

Datum poslední revize textu: 10.5.2005