


QuikRead CRP kontrola

Kat.č.68296

Návod k použití

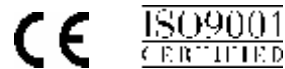

Určený účel použití

Orion Diagnostica QuikRead CRP kontrola je určena ke kontrole kvality testu QuikRead CRP pomocí QuikRead Instrument nebo QuikRead 101.

Pro použití in vitro.

Princip metody

Kontrolu používejte stejným způsobem jako vzorek neznámé plné krve s použitím návodu k použití pro test. Hodnoty QuikRead CRP kontroly jsou specifikovány výjimečným způsobem pro pipetování objemu 20 µl stejně jako je pipetován vzorek plné krve.

Reagencie

QuikRead CRP kontrola je materiál lidského původu. Mělo by s ní být zacházeno jako s patientským vzorkem.

Příprava

QuikRead CRP kontrola je připravena k použití. Materiál nechte temperovat 30 minut na laboratorní teplotu (18 – 25°C) . Dobře promíchejte. Netřepete.

Skladování

QuikRead CRP kontrola je stabilní do data expirace, pokud je skladována při 2-8°C.

Otevřená lahvička je stabilní 2 měsíce při 2...8°C.

Lahvičku, která by vykazovala známky mikrobiálního růstu, vyhod'te.

Očekávané hodnoty

Získané hodnoty by se měly pohybovat v rozmezí uvedeném na štítku lahvičky s kontrolou. Každá laboratoř by si měla vytvořit vlastní průměr a přesná data.

Upozornění a varování

Reagencie obsahují < 0,1 % azidu sodného jako konzervační činidlo. Azid sodný uvolňuje toxický plyn, pokud je v kontaktu s kyselinami. Azidy mohou reagovat s kovovými uzávěry za vzniku explozivní sloučeniny, proto při likvidaci reagentů vše opláchnete velkým množstvím vody.

Doporučujeme všechny použité materiály a reagentie před likvidací autoklávovat (1 hod při 121°C).

QuikRead CRP pozitivní kontrola obsahuje materiál lidského původu, který byl testován a shledán negativním na protilátky proti viru lidské imunodeficiency (HIV 1 a 2), virus hepatitidy C (HCV) a na povrchový antigen viru hepatitidy B (HBsAg). Přesto s kontrolou jako s materiálem schopným přenášet infekční agens.

Vysvětlení symbolů použitých na štítcích

Diagnostický zdravotnický prostředek in vitro

IVD

Katalogové číslo

REF

Číslo šarže

LOT

Použitelné do



Teplotní rozmezí: skladujte při teplotě 2...8°C



Kontrola

CONTROL

Původ lidský

ORIG HUMAN

Obsahuje azid sodný

CONT NAN₃

Výrobce:

Orion Diagnostica Oy
P.O. Box 83, FIN-02101 Espoo, Finland
tel. +358-10-42 995; fax. +358-10-429 2794
www.oriondiagnostica.fi

Sídlo v ČR:

Orion Diagnostica-organizační složka
Bělohorská 57, 169 00 Praha 6
Tel. 233 350 533
E-mail: orion@oriondiagnostica.cz
www.oriondiagnostica.cz

Datum poslední revize textu: 23.2.2005

Originální příbalová informace: 39884-7