




Urine Albumin Control

Kat. č. 67881

Návod k použití

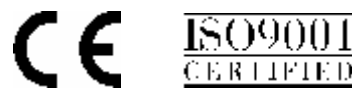

Určený účel použití

Kontrola na albumin v moči firmy Orion Diagnostica je určena pro použití a potvrzení kontroly kvality měření mikroalbuminurie imunoturbidimetricky, nefelometricky a systémem QuikRead.

Pro diagnostické použití in vitro.

Princip

Kontrola by měla být použita stejným způsobem jako neznámý vzorek, při dodržování návodu pro postup měření.

Reagencie

Kontrola je materiál lidského původu. Pracujte s ní tak jako se vzorkem pacienta.

Příprava

Kontrola pro albumin v moči je připravena k použití. Materiál nechte temperovat 30 minut na laboratorní teplotu (18...25° C). Dobře promíchejte. Netřepte.

Uchovávání

Kontrola je stabilní do data expirace, pokud je uchovávána při 2...8°C.

Otevřená lahvička je stabilní po dobu 12 týdnů při teplotě 2...8° C.

Nepoužívejte žádnou lahvičku se zřejmou přítomností mikrobiálního růstu.

Očekávané hodnoty

Jednotlivé hodnoty by se měly pohybovat v uvedeném rozmezí. Každá laboratoř by si měla stanovit vlastní průměr a přesná data.

Upozornění a varování

Reagencie obsahují < 0,1% azidu sodného jako konzervační činidlo. Azid sodný uvolňuje toxický plyn, pokud je v kontaktu s kyselinami. Azidy mohou reagovat s kovovými uzávěry za tvorby explozivních látek. Tvorbě azidů lze předejít tím, že při likvidaci reagií vše opláchnete velkým množstvím vody.

Doporučujeme všechny použité materiály a reagencie před likvidací autoklávovat (1 hod při 121° C).

Kontrola obsahuje materiály lidského původu. Albumin použitý v kontrole byl testován a shledán negativním na HIV protilátky, HCV, HbsAg. Kontrolní materiál byl inaktivován 1 hodinu při 56° C. S produktem pracujte jako s materiálem potenciálně přenášející infekční agens.

39969-4

Vysvětlení symbolů použitých na štítcích

Diagnostický zdravotnický prostředek in vitro

IVD

Katalogové číslo

REF

Číslo šarže

LOT

Použitelné do



Teplotní rozmezí: skladujte při teplotě 2...8°C



Kontrola

CONTROL

Původ lidský

ORIG HUMAN

Obsahuje azid sodný

CONT NAN₃

Výrobce:

Orion Diagnostica Oy
P.O. Box 83, FIN-02101 Espoo, Finland
tel. +358-10-42 995; fax. +358-10-429 2794
www.oriondiagnostica.fi

Sídlo v ČR:

Orion Diagnostica-organizační složka
Bělohorská 57, 169 00 Praha 6
Tel. 233 350 533
E-mail: orion@oriondiagnostica.cz
www.oriondiagnostica.cz

Datum poslední revize textu: 23.2.2005

Originální příbalová informace: 39969-4