




## Ultrasensitive CRP Control

Kat. č. 68257

### Návod k použití

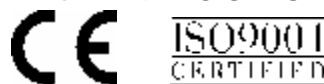

### Kontrola pro ultrasenzitivní CRP

#### Určený účel použití

Kontrola pro ultrasenzitivní CRP firmy Orion Diagnostica je určena ke kontrole kvality testu pro měření nízkých koncentrací CRP na biochemických analyzátoch.

Pro použití in vitro.

#### Princip metody

Kontrolu používejte stejným způsobem jako použité vzorky za dodržení postupů určených pro danou metodu.

#### Reagencie

Kontrola je materiál lidského původu. Mělo by s ní být zacházeno stejným způsobem jako s patientským vzorkem.

#### Příprava

Kontrola pro ultrasenzitivní CRP je připravena k použití. Materiál nechte temperovat 30 minut na laboratorní teplotu (18...25°C). Dobře promíchejte. Netřepete.

#### Skladování

Kontrola pro ultrasenzitivní CRP je stabilní do data expirace, pokud je skladována při 2...8°C. Otevřená lahvička je stabilní 2 měsíce při 2...8°C.

Lahvičku, která by vykazovala známky mikrobiálního růstu, vyhod'te.

#### Očekávané hodnoty

Získané hodnoty by se měly pohybovat uvnitř indikovaného rozmezí. Každá laboratoř by si měla vytvořit vlastní průměr a přesná data.

#### Upozornění a varování

Reagencie obsahují < 0,1 % azidu sodného jako konzervační činidlo. Azidy mohou reagovat s kovovými uzávěry za vzniku explozivní sloučeniny, proto při likvidaci reagentů vše opláchnete velkým množstvím vody.

Doporučujeme všechny použité materiály a reagencie před likvidací autoklávkovat (1 hod při 121°C).

Kontrola pro ultrasenzitivní CRP obsahuje materiál lidského původu, který byl testován a shledán negativním na HCV, HBsAg a protilátky proti HIV 1 a 2. Přesto s kontrolou pracujte jako s materiálem schopným přenášet infekční agens.

## Vysvětlení symbolů použitých na štítcích

Diagnostický zdravotnický prostředek in vitro

**IVD**

Katalogové číslo

**REF**

Číslo šarže

**LOT**

Použitelné do



Teplotní rozmezí: skladujte při teplotě 2...8°C



Kontrola

**CONTROL**

Původ lidský

**ORIG HUMAN**

Obsahuje azid sodný

**CONT NAN<sub>3</sub>**

Výrobce:

Orion Diagnostica Oy  
P.O. Box 83, FIN-02101 Espoo, Finland  
tel. +358-10-42 995; fax. +358-10-429 2794  
[www.oriondiagnostica.fi](http://www.oriondiagnostica.fi)

Zastoupení výrobce v ČR:

Orion Diagnostica-organizační složka  
Kykalova 1, 146 20 Praha 4  
E-mail: [orion@oriondiagnostica.cz](mailto:orion@oriondiagnostica.cz)

Datum poslední revize textu:

9.7.2004

Originální příbalová informace:

36073-1