

QuikRead® FOB kvantitativně

Stručný návod k obsluze

1



Načtěte kartu.

2



Odstraňte z kyvety krycí fólii. Hladina roztoku musí být mezi dvěma ryskami vyznačenými na kyvetě. Nedotýkejte se kyvety v její spodní části.

3



Promíchejte odběrovou zkumavku, odlomte špičku a první tři kapky zlikvidujte do odpadu. Poté přidejte tři kapky vzorku do kyvety.

4



Kyvetu pevně uzavřete víčkem s FOB reagensií. Netlačte na vnitřní hnědou část víčka. Kyvetu vložte do měřicí cely přístroje.

5



Probíhá měření blanku (cca 20 sekund). Stisknutím vnitřní hnědé části víčka přidejte reagensii FOB.

6



Vyjměte kyvetu a rázně míchejte obrácením dna vzhůru.

7



Vložte kyvetu zpět do měřicí cely. Do 1 minuty se na displeji zobrazí výsledek.

Podrobné informace naleznete v návodu k obsluze.

POCT

